

Sonstige Pumpeneinstellungen:

Im **Pumpeneinstellungen-Menü** können Sie

- Uhrzeit und Datum verändern,
- Piepton oder Vibration einstellen und die Tastentöne (de-)aktivieren
- und die Programmsperre setzen oder aufheben (Code 17)

Einstellen der Alarme und Meldungen:

Gehen Sie über das **Menü** zu **Pumpeneinstellung** in **Anpassen** und wählen Sie **Meldungen**.


Hier haben Sie die Möglichkeit Meldungen persönlich einzustellen (Reservoirstand niedrig, stündliches Abgabelimit, Erinnerung den Blutzucker zu bestimmten Zeiten zu messen, Automatische Abschaltung aktivieren, Setwechsel-Erinnerung, Erinnerung an verpassten Essensbolus).

Einstellen und ansehen der Historie:


Gehen Sie über das **Menü** zu **Pumpeneinstellung** in **Anpassen** und wählen Sie **Historie**.

Jetzt können Sie frei wählen, ob und was Sie im Menü an Daten sehen wollen (Bolus-, Blutzucker- oder Gesamthistorie, Abgabeübersicht oder diverse Berechnungen sowie Einstellen des Homebildschirms Blutzucker BZ, über den Sie den aktuellen Wert eingeben und vorherige Werte ansehen können). Die Historiendaten sind dann in Ihrem Menü abrufbar.

Mit der CoZmanager Software lässt sich Cozmo einfach **programmieren und auslesen**. Die Daten werden ganz einfach über die Infrarotschnittstelle übertragen.

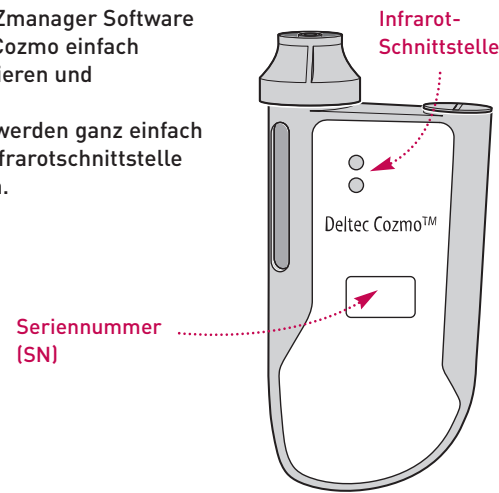

Stop & Go

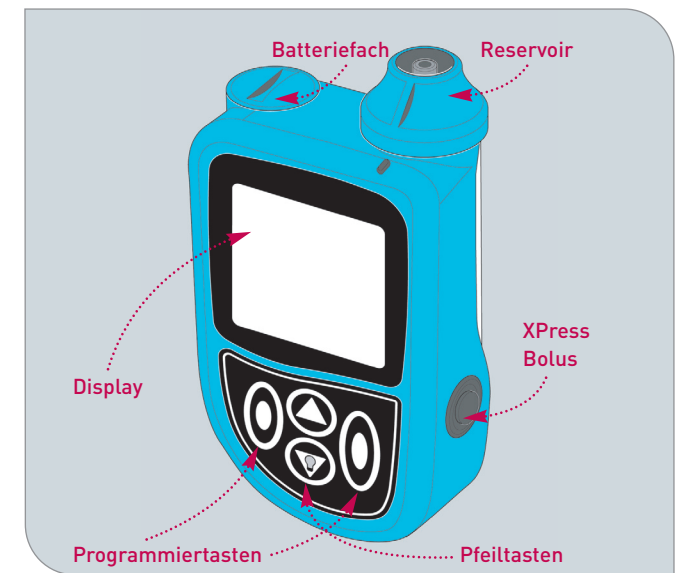

Für Notfälle – unsere 24 Std.-Hotline:
00800/cozmoinfo
00800/26 96 64 63



THE DETAILS GIVEN IN THIS LEAFLET ARE CORRECT AT THE TIME OF GOING TO PRESS. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO IMPROVE THE EQUIPMENT SHOWN.

Smiths Medical Deutschland GmbH

Hauptstraße 45-47, 85614 Kirchseeon,
Telefon +49 8091 551-222, Telefax +49 8091 551-204

Smiths Medical Österreich GmbH

Campus 21, Europaring A 03 5 02, 2345 Brunn am Gebirge,
Telefon +43 1 86670 21560, Telefax +43 1 86670 21566

Smiths Medical Schweiz AG


Eichwatt 3, 8105 Regensdorf,
Telefon +41 43 38862-00, Telefax +41 43 38862-11

www.cozmore.de www.cozmore.at www.cozmore.ch

Smiths Medical – a part of Smiths Group plc

Smiths Medical Design Mark, Deltec Cozmo and CoZmanager are registered trademarks of Smiths Group plc.; Copyright 2008 Smiths Medical Family of Companies. All rights reserved. Lit.-Nr. ZYC-07_01/2008

smiths medical

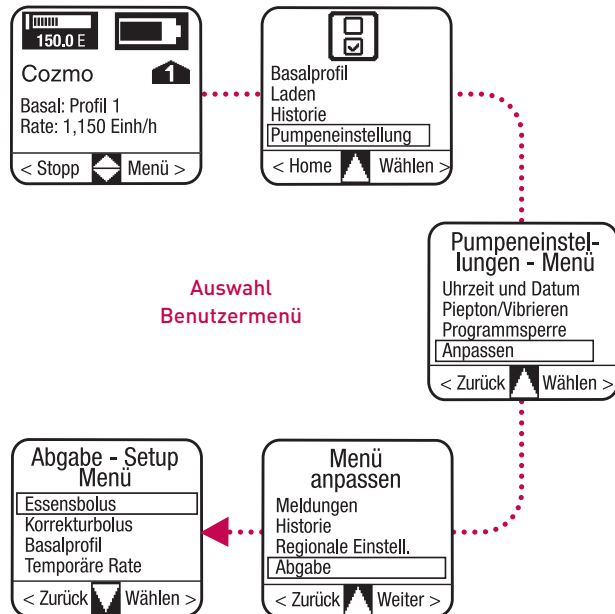


DIABETES MANAGEMENT

cozMORE™

Einlegen der Batterie


Entfernen Sie mit einer Münze den Batterie-
deckel und drehen Sie ihn nach links, um ihn zu
öffnen. Setzen Sie eine AAA Alkalibatterie mit
der positiven Seite nach unten ein und schrau-
ben Sie den Deckel wieder fest. Die Pumpe führt
jetzt einen Selbsttest aus. Sie vibriert und piepst
dann 6 mal.

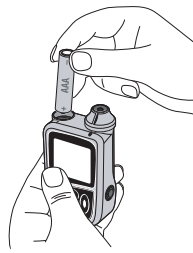

Jetzt erscheint der Hauptbildschirm.
Nach 15 Sekunden schaltet sich
der Bildschirmschoner ein.
Dieser zeigt die aktuelle Zeit
und Basalrate oder Meldungen.

Füllen des Reservoirs

Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen
Sie alle drei Teile (Nadel, Reservoir, Kappe).
Schrauben Sie die Nadel auf das Reservoir
und entfernen Sie die Schutzkappe. Bereiten
Sie das Reservoir vor, indem Sie den
Spritzenkolben mehrmals vor und zurück
schieben. Füllen Sie dann das Reservoir mit
100 bis 300 Einheiten. Entfernen Sie evtl.
auftretende Luftbläschen durch Klopfen.
Stecken Sie die Schutzkappe wieder auf und
entsorgen Sie die Nadel. Drehen Sie den
Spritzenkolben entgegen dem Uhrzeigersinn
ab und entsorgen Sie ihn.

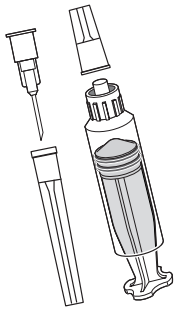

Einlegen des Reservoirs:


Gehen Sie mit einer beliebigen Taste aus
dem Bildschirmschoner heraus und gehen
Sie in das Menü.

Blättern Sie mit der unteren Pfeiltaste zu
Laden und drücken Sie **Wählen**. Wählen Sie
nun **Laden** aus und folgen Sie den
Anweisungen auf dem Display. Um das
Reservoir zu entnehmen, drehen Sie die
Kappe 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeiger-
sinn und nehmen sie ab. Drehen Sie jetzt das
Reservoir 1/4 Umdrehung nach links und
entfernen Sie es. Legen Sie jetzt das neue
Reservoir ein und arretieren Sie es mit einer
1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn.
Schrauben Sie nun wieder die Kappe auf.



Anlegen und Füllen des Katheters:

Packen Sie den Katheter aus und schrauben Sie ihn durch die
Öffnung der Reservoirkappe an den Luer Anschluss.
Wählen Sie im Reservoir Menü **Schlauch füllen** aus.
Drücken Sie **Start**, um den Katheter vorzufüllen. Beenden Sie
den Vorgang mit **Stopp**, wenn 4-5 Tropfen herauslaufen.
Kehren Sie in das Reservoir Menü zurück und fahren Sie mit
Kanüle füllen fort, wenn Sie eine Teflonkanüle verwenden oder
beenden Sie den Vorgang hier.

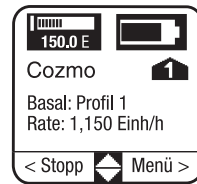

Die Hauptbildschirme:

Jeder Bildschirm zeigt:

- Restmenge von Insulin im Reservoir
- Batteriestand
- Persönlichen Pumpennamen oder Cozmo, falls nichts einprogrammiert
- Nummer des Hauptbildschirms
- Stopp (linke Programmierertaste stoppt Zufuhr)
- Menü (rechte Programmierertaste)

Standard:

Bildschirm 1: Momentanes Basalratenprofil und -rate
Bildschirm 2: Letzter programmierter Bolus, Zeit und Menge
Bildschirm 3: Datum und Uhrzeit, evtl. zwei persönl. Textzeilen

Optional:

Blutzucker (**BZ**): Letzter Wert; über Stop-BZ Eing. d. neuen Werts
Temporäre Rate (**TR**): Aktive Rate und Restlaufzeit
Insulinwirkzeit (**IWZ**): Verbleib. Restinsulin in Menge und Zeit
Setwechsel (**SW**): Erinnerung an nächsten Katheterwechsel

ACHTUNG! Das Personalisieren der Pumpe wird ausführlich im Cozmo Step-by-Step Training erörtert.

Einstellen eines Basalratenprofils:

Gehen Sie in das **Menü** und wählen Sie **Basalprofil** aus.
Drücken Sie nun **Ändern** und stellen Sie die gewünschten
Einheiten mit den **Pfeiltasten** ein. Drücken Sie dann **Weiter**.
Stellen Sie jetzt den nächsten Zeitraum mit den **Pfeiltasten**
ein und drücken Sie **Weiter**. Fahren Sie so fort und drücken Sie am
Ende zur Bestätigung **Fertig**. Weitere Profile (es sind 4 möglich)
können Sie im Abgabe-Setup-Menü aktivieren.

Basalrate starten/stoppen:

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirmschoner zu
deaktivieren und wählen Sie **Neustart**. Sie werden gefragt,
ob Sie die Abgabe neu starten wollen. Bestätigen Sie mit **Ja**.
Das Stoppen funktioniert genauso. Drücken Sie **Stopp** und
bestätigen Sie mit **Ja**.

Abgabe eines Standardbolus:

Gehen Sie in das Menü und wählen Sie **Essensbolus** aus.
Wählen Sie die gewünschten Einheiten mit den **Pfeiltasten**
aus und drücken Sie **abgeben**.

Personalisieren des Bolusmenüs:

Gehen Sie in das **Menü** und wählen Sie **Pumpeneinstellung**.
Drücken Sie im Pumpeneinstellungen-Menü **Anpassen** und
wählen Sie **Abgabe**.
Konfigurieren Sie nun im Abgabe-Setup-Menü den **Essensbolus**
(Programmieren in Insulineinheiten oder Kohlenhydrate,
Maximalbolus, Bolusschritte, -dauer, Aktivieren des verlängerten
oder dualen Bolus im Menü, Einstellen des XPress Bolus).
Sofern Sie den verlängerten oder dualen Bolus eingestellt haben,
können Sie diese Funktionen jetzt auch im Bolusmenü anwählen
und verwenden.

Abgabe eines XPress Bolus:

Drücken Sie den **XPress-Bolusknopf** an der Seite, um diese
Funktion aufzurufen und stellen Sie nun die gewünschten
Einheiten mit dem selben Knopf ein.
Cozmo bestätigt die Einheiten mit Pieptönen oder Vibration.
Um den Bolus abzugeben, drücken Sie noch einmal den
XPress-Bolusknopf.

Personalisieren der Temporären Rate:

Gehen Sie in das Abgabe-Setup-Menü über **Pumpeneinstellung-
Anpassen-Abgabe** und wählen Sie dort die **Temporäre Rate** aus.
Wählen Sie **Temporäre Rate** im Menü anzeigen aus.
Personalisieren Sie nun die Programmierung nach Ihren
Wünschen (Prozent oder Einheiten, Erinnerungsfunktionen,
Homebildschirm, benutzerdefinierte Raten)

Temporäre Rate starten/stoppen:

Wählen Sie im **Menü Temporäre Rate**. Aktivieren Sie nun
entweder eine bereits voreingestellte Rate oder stellen Sie Dauer
und Rate mit den **Pfeiltasten** ein und drücken Sie **Abgeben**.
Zum Stoppen der Temporären Rate drücken Sie **Stopp** (linke
Programmierertaste), wählen Sie **Temporäre Rate** aus und
bestätigen Sie dies mit **Ja**.